


MEDLANCE^{plus}

Instructions of use

1. Otočiť • Csavarni

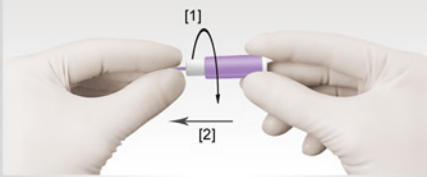

Otočte ochrannú čiapku a vytiahnite ju rovno von.

Csavarja le a védőcupakot, majd egyenesen húzza ki.

2. Pritlačiť • Nyomni



Pritlačením telesa Medlance plus na miesto odberu aktivuje vpichovacie zariadenie.

Nyomja szorosan Medlance plus testét a szűrés helyszínére, hogy aktiválja a szűrőrendszer.

3. Odber • Gyűjteni



Pôsobte jemným prerušovým tlakom na okolie vpichu k dosiahnutiu požadovaného objemu krvi.

Gyakoroljon enyhe nyomást a szűrés területé körül, amíg megjelen szükséges vérminta mennyiség.

CE 0344

25G
Ihla
Tű

Hĺbka vpichu
Behatolási mélység
1,5 mm



Medlance^{plus}

Lite

Kat.č. • Kat.sz.: 7043
Krabíčka (ks) • doboz (db): 200
Kat.č. • Kat.sz.: 7243
Krabíčka (ks) • doboz (db): 100

21G
Ihla
Tű

Hĺbka vpichu
Behatolási mélység
1,8 mm



Medlance^{plus}

Universal

Kat.č. • Kat.sz.: 7044
Krabíčka (ks) • doboz (db): 200
Kat.č. • Kat.sz.: 7244
Krabíčka (ks) • doboz (db): 100

21G
Ihla
Tű

Hĺbka vpichu
Behatolási mélység
2,4 mm



Medlance^{plus}

Extra

Kat.č. • Kat.sz.: 7045
Krabíčka (ks) • doboz (db): 200
Kat.č. • Kat.sz.: 7245
Krabíčka (ks) • doboz (db): 100

0,8mm
Čepička
Penge

Hĺbka vpichu
Behatolási mélység
2 mm



Medlance^{plus}

Special

Kat.č. • Kat.sz.: 7046
Krabíčka (ks) • doboz (db): 200
Kat.č. • Kat.sz.: 7246
Krabíčka (ks) • doboz (db): 100



Ideálne pre monitorovanie hladiny glukózy v krvi.

Ideális cukorszint megfigyelési célokra.



Vždy, keď budete potrebovať väčšie množstvo krvi pre testovanie glukózy, hemoglobínu, cholesterolu, krvnej skupiny, koagulácie, krvných plynov a mnoho ďalších

Mindig, amikor csak szükség van nagyobb vérmintára, vizsgálni glükózt, hemoglobint, koleszterint, vércsoportot, koagulációt, vér gázt és sok más.



Pokožka pacienta je tvrdá? Potrebujete viac krvi? Použite Medlance^{plus} Extra a získate viac ako 30 µl rovnako od mužov aj fyzicky pracujúcich

Beteg bőre kemény? Több vére van szükség? Használjon Medlance^{plus} Extra lándzát és összegyűjthet több mint 30 µl is ugyan úgy férfiakól és fizikai dolgozóktól.



Medlance^{plus} Special sú mimoriadne vhodné pre testy vyžadujúce väčšie množstvo krvi. Ultra ostrá čepeľka zaisťuje zodpovedajúci objem krvi a rýchle hojenie.

Medlance^{plus} Special különlegesen tökéletes a nagyobb vérmintákat kívánó vizsgálatokhoz. Ultra éles penge biztosítja a megfelelő vérmennyiséget és gyors gyógyulást.

MEDLANCE^{plus}

Product features Lite

- **Bezpečné**: jednorazové použitie, samodeštruktívne. Žiadna možnosť opätovného použitia.
- **Jednoduché**: použitie v 2 intuitívnych krokoch. Jednoduchý odber krvi ako nikdy predtým.
- **Sterilné**: ihly sterilizované Gama žiarením.
- **Biztonságos**: egyszer használatos, önmegsemmisítő. Nincs lehetőség újrafelhasználásra.
- **Egyszerű**: intuitív 2 lépéses használási művelet. Vértétel könnyebb, mint valaha ezelőtt.
- **Steril**: Gama besugárzással sterilizált tűk.



- **Gyengéd**: ultra éles tű, optimális bőrbekhatolás. Rezgések nélkül – nem fáj, nem károsítja a szövetet.
- **Testreszabott**: elérhető 5 különböző méretben megfelelő vérminta mennyiség szerzéshez és különböző páciens bőrtípusára.
- **Hatékony**: egyedülálló konstrukció biztosítja a megfelelő vérminta mennyiségét minimális fájdalom szinten.
- **Jemné**: ultra tenké ihly, optimálne prenikanie pokožkou. Vylúčené vibrácie – bez bolesti a bez poškodenia tkaniva.
- **Šité na mieru**: dodávané v 5 rôznych rozmeroch pre odobratie požadovaného objemu vzorky krvi a pre rôzne druhy pokožky pacientov.
- **Efektívne**: technicky ojedinelá konstrukcia zaručuje požadovaný objem krvi a minimálnu úroveň bolesti.



BOX 100ct
200ct

MEDLANCE^{plus}



HTL STREFA
high tech lab

HTL-STREFA S.A.
95-035 Ozorków
Adamówek 7, Poland
T: +48 22 587 05 72 • F: +48 22 811 05 36
info@htl-strefa.pl • www.htl-strefa.pl

Distribúcia:
KONEX MEDIK spol. s r.o.
Rastislavova 7
040 01 Košice, Slovensko
T: +421 55 7266 217 • F: +421 55 7266 216
konexmedik@konex.sk • www.konexmedik.sk

Forgalmazó:
KONEX MEDIK Kft.
Rastislavova 7
040 01 Kosice, Szlovákia
T: +421 55 7266 217 • F: +421 55 7266 216
konexmedik@konexmedik.com • www.konexmedik.com

553-556MP032011HU-ISK

MEDLANCE^{plus}

Safety Lancets

